


Airwheel F3

INTELLIGENTE DOPPELFILTER-FRISCHLUFTMASKE

GEBRAUCHSANWEISUNG


deutsche Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung

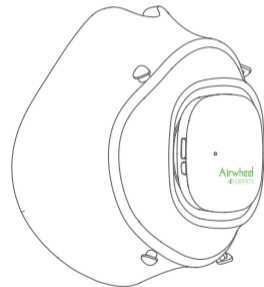

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist für nicht sterile, medizinische Anwendungen vorgesehen. Dieses Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und nicht zum Teilen mit anderen Personen geeignet.

Baugruppen

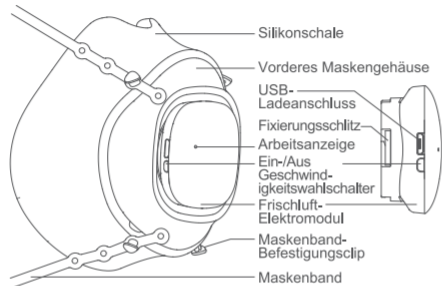

Standardmäßiger Lieferumfang

Intelligente Doppelfilter Frischluftmaske	1 Stück	Pinzette	1 Stück
Maskenband	2 Paare	Filter	1 Packung (5 Stück)
Qualifikationszertifikat	1 Stück	USB-Ladekabel	1 Stück
Gebrauchsanweisung	1 Stück		

Spezifikationen

Produktgröße (ohne Maskenband)	98x102x74mm	Schalensmaterial	PC Silikon in Lebensmittelqualität
Eigengewicht	73g	Ladezeit	60min
Motordrehzahl	8500RPM	Batteriekapazität	300mAh
Standardspannung	3,7V	Zyklusmodus	Automatische Frischluft
Maximales Luftvolumen	2.55CFM		

Gebrauchsanweisung Trageoptionen

1 Gebrauchsanweisung Trageoptionen


Wählen Sie die richtige Lochposition und befestigen die beiden Enden des Maskenbandes an den Befestigungsclips. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Produkt zu tragen: Sie können die Gummibänder an den Ohren einhängen oder über den Kopf ziehen.



2 Start und Modus

Das Produkt verfügt über drei Modi:

1. Komfort-Modus-hohe Ventilator-Geschwindigkeit
 2. Energiesparmodus-niedrige Ventilator-Geschwindigkeit
 3. Smart-Modus-wechselnde Ventilator-Geschwindigkeit
- Die werkseitige Standardeinstellung ist der Komfort-Modus. Drücken Sie den „Ein-/Aus Geschwindigkeitswahlschalter“ kurz, um ihn einzuschalten. Die Arbeitsanzeige leuchtet durchgehend blau. Drücken Sie nach dem Einschalten die Taste kurz in den Energiesparmodus, die Arbeitsanzeige leuchtet schwächer. Drücken Sie erneut, um auszuschalten. Der Smart-Modus kann nur über die APP eingestellt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der Smart APP.

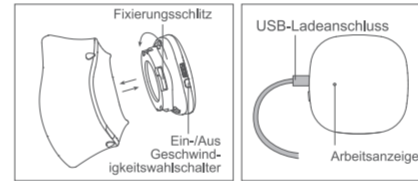

3 Leistungsbeschreibung

Wenn das Modul wenig Strom hat, blinkt die Arbeitsanzeige in regelmäßigen Abständen blau. Stecken Sie das USB-Ladekabel in den Ladeanschluss des Frischluft-Elektromoduls. Die Arbeitsanzeige blinkt weiterhin langsam blau und die Batterie ist nach 60 Minuten Ladezeit voll.


4 Demontage Montagedes Frischluftmoduls

Drehen Sie das Frischluft-Elektromodul um 30 ° gegen den Uhrzeigersinn, um es nach außen abzunehmen. Richten Sie den Modulbefestigungsschlitz an der Schnalle an der vorderen Abdeckung der Maske aus und drehen Sie ihn um 30 ° im Uhrzeigersinn, um das Frischluftmodul zu verriegeln.

Filterwechsel

Der Filter muss alle 8 –12 Stunden ausgetauscht werden.

Wenn der Filter für längere Zeit verwendet wird, sammeln sich Staub und feine Partikel an, welche die Atmung beeinträchtigt und die Filtereffizienz verringert. Daher muss der Filter rechtzeitig ausgetauscht werden (abhängig von der Verwendungszeit und der Umgebung). Wenn die Maske längere Zeit nicht verwendet wird, empfehlen wir, den Filter zu entfernen und versiegelt zu halten.

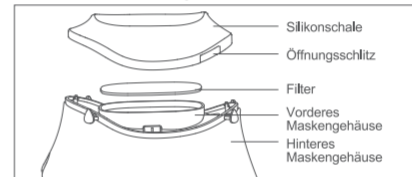

So wechseln Sie den Filter

Halten Sie den Verschluss und ziehen Sie ihn nach oben. Entfernen Sie nach dem Öffnen des vorderen Maskengehäuses den alten Filter mit einer Pinzette. Der Filter muss mit der dunklen Seite nach außen eingelegt werden. Drücken Sie nach dem Austausch des neuen Filters die vordere und hintere Schale des Filters fest zusammen bis diese einrasten, um den Austausch abzuschließen.

Automatisches Herunterfahren

Wenn die Maske in Betrieb ist, erkennt das System automatisch den Status der Maske. Wenn keine Bewegung erkannt wird, schaltet sich die Maske nach 5 Minuten automatisch aus. Sie können die automatische Abschaltfunktion über die APP deaktivieren. Siehe Abschnitt APP

APP Download




Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.

*Anwendbar für Android 4.3 oder höher, IOS 8.0 oder höher.

APP Anweisungen

1. Schalten Sie die Maske ein, starten Sie die APP und schalten Sie gleichzeitig Bluetooth ein.
2. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte.
3. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der offiziellen Website oder rufen Sie den Kundendienst an.

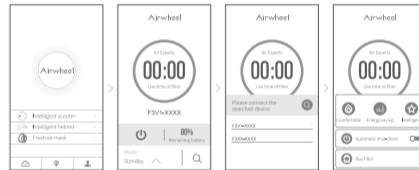

Klicken Sie in der APP-Oberfläche auf die

Frischluftmaske.

Klicken Sie auf die Schaltfläche der Hauptschnittstelle Wählen Sie das Gerät aus und schließen Sie es an.

Klicken Sie unten auf "A", um die Seite zum Wechseln des Modus aufzurufen, die je nach persönlichen Anforderungen frei ausgewählt werden kann.

Sicherheitshinweise

Bevor Sie die Frischluftmaske zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte dieses Kapitel sorgfältig durch und beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen, um dieses Produkt sicher zu verwenden. Im Falle eines Unfalls wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Bitte vermeiden Sie harte Erschütterungen und Schläge auf das Frischluft-Elektromodul.

Bitte überprüfen Sie das Produkt nach schwereren Erschütterungen (hinuntergefallen, Kollisionen) sofort auf Beschädigungen. Wenn Sie eine abnormale Arbeitsweise feststellen, schalten Sie die Maske bitte aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in einer übermäßig feuchten Umgebung.

Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in Umgebungen wie Regen und hohen Temperaturen geeignet.

Sicherheitshinweise für Batterie und den Ladevorgang

1. Dieses Produkt unterstützt nur das Laden mit einem Standard-5-V-Netzteil, um Produktschäden durch unsachgemäßes Laden zu vermeiden.
2. Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs oder der Lagerung von Feuerquellen fern und vermeiden Sie es, das Produkt längere Zeit in einer Umgebung mit hohen Temperaturen (über 50 ° C) zu verwenden.
3. Bewahren Sie das Gerät beim Aufladen an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.
5. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, muss es vollständig aufgeladen und heruntergefahren werden. Das Produkt darf nicht mehr als 3 Monate ohne Aufladung gelagert werden.



Warnung

- Das Frischluft-Elektromodul ist nur für dieses Produkt geeignet.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und entfernen Sie keinesfalls die interne Batterie.
- Das Unternehmen übernimmt für damit verbundene Sicherheitsrisiken keine Haftung.

Kontraindikationen


Die Anwendung bei Patienten mit Herzerkrankungen, Bluthochdruck und Atemwegserkrankungen ist verboten. Wenn Sie nach dem Gebrauch Schwindel, Mattheit usw. verspüren, sollten Sie die Verwendung sofort einstellen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte reinigen und warten Sie das Produkt rechtzeitig: Reinigen Sie es regelmäßig und tauschen Sie den Filter rechtzeitig aus.
2. Zerlegen Sie aufgrund der Eigenschaften des Produkts die interne Batterie nicht ohne Erlaubnis, da dies zu einem Defekt der Maschine führen kann und nicht im Rahmen der Wartung liegt.
3. Wenn das Frischluftmodul läuft, stecken Sie Ihre Finger nicht in den Ventilatorraum, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Führen Sie bei laufendem Frischluftmodul keine Fremdkörper in den Ventilatorraum ein, um eine Beschädigung des Frischluftmoduls zu vermeiden.
5. Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Bitte entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Bestimmungen. Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll.

Produktreinigung und Wartung

1. Die Oberfläche des Produkts kann mit Alkohol gereinigt werden. (Mit Ausnahme des Filters und des Frischluft-Elektromoduls kann dieses Produkt gekocht und desinfiziert werden.)
2. Der Silikonanteil der Maske kann entlang des Druckknopfs an der hinteren Hülle der Maske entfernt werden. Nach dem Entfernen kann es mit Wasser gewaschen / mit Alkohol sterilisiert oder mit kochendem Wasser sterilisiert werden (die Reinigungszeit im kochendem Wasser sollte ca. 3-5 Minuten betragen).
3. Nach dem Entfernen des Maskenbandes können Sie dieselbe Reinigungsmethode wie bei der Silikonchale anwenden.
4. Der Hohlraum kann mit einem staubfreien Tuch oder einem in Alkohol getauchten Wattestäbchen zum Reinigen abgewischt werden.
5. Tauchen Sie das Frischluftmodul während der Reinigung nicht in Wasser.
6. Bitte wechseln Sie den Filter rechtzeitig entsprechend der tatsächlichen Nutzung und der Smart APP-Erinnerung.

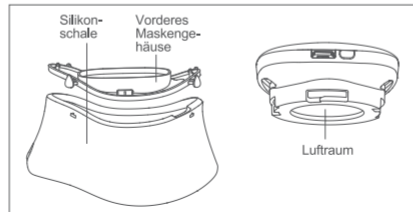

Garantie für die Airwheel F3

Ab dem Kaufdatum können Benutzer die einjährige Garantie des gesamten Geräts mit der Rechnung und dem gültigen Garantiezertifikat nutzen.

Verbrauchsmaterialien sind nicht von der Garantie abgedeckt. (Zu den Verbrauchsmaterialien gehören unter anderem: Silikonchale, Filter, Maskenband, Batterie.)

Für die folgenden Bedingungen gilt kein Garantieservice:

1. Alle Fehler und Schäden, die durch Fehlbedienung verursacht wurden.
2. Schäden, die durch Nichtbenutzung, falsche Wartung und Instandhaltung gemäß den Gebrauchsanweisungen verursacht wurden;
3. Änderung der Rechnung, Überschreiten der Gewährleistungsgültigkeitsdauer.
4. Das Produktmodell und der Herstellungscode des Garantiezertifikats stimmen nicht mit dem zu reparierenden Produkt überein.
5. Beschädigung des Frischluft-Elektromoduls durch Eindringen von Wasser;
6. Schäden durch höhere Gewalt wie Feuer, Blitzschlag, Erdbeben, etc;
7. Bruch durch unsachgemäße Lagerung von Benutzern oder Unfälle: Normaler Verschleiß, mechanische Beschädigungen und Kontamination.

CE-Konformitätsinformation

Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG hergestellt. Dieses Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen versehen und verfügt über eine CE-Konformitätserklärung zur Einsichtnahme der Marktüberwachungsbehörden.



Benutzerinfo

Name: _____ Telefon: _____

Email: _____

Adresse: _____

Produktinformation

Produktmodell: _____ Reparaturdatum: _____

Name der Wartungsstelle: _____

durchgeführte Reparaturen: _____

Problemursache: _____

SN: _____

Wartungssignatur: _____

Kundendienstinformationen

Wenn Sie die Adresse des Kundendienstes möchten oder andere Fragen haben, rufen Sie bitte die Kundendienst-Hotline an oder melden Sie sich für Anfragen auf der Website an.



Hersteller:
Changzhou Airwheel
Technology Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, East Wing, Building
No.10. High-Tech Park, Kewu Road, Xinbei
District, Changzhou, Jiangsu, China
E-Mail: after-sale@airwheel.net
Die Daten dienen nur als Referenz, bitte
beziehen Sie sich auf das Endprodukt.

The data is for reference only, please refer to the final product.



Autorisierter Bevollmächtigter für die EU:
M/s CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo N° 18
CP 29006 Malaga, Spain
Registrierungsnummer: RPS/1546/2020

Distributor:
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Lichtenstein
Help-24 GmbH
Leopoldauer Str. 17
1210 Wien
0043 (0)1 270 61 08 60
www.mediziprodukt.at
info@help-24.at



www.airwheel.net